

Aptus®

Produktfakta Aptus SentrX SPRAY

Aptus SentrX en sårläkningspray för hund, katt och häst

Produktbeskrivning

När en sårskada uppstår, frigörs signaler från vävnaden som i sin tur stimulerar cellerna att reparera skadan. De celler som medverkar i den naturliga läkningsprocessen kan lättare migrera genom det tredimensionella nätverk, som skapas av SentrX hydrogel och sluta såret. Detta bidrar till en snabbare och effektivare läkningsprocess.

Rekommenderas vid

- Traumatiska sårskador.
- Färska icke infekterade sår.
- Kroniska sårskador (debridering krävs innan behandling).

Förpackningsstorlek

Sprayflaska 15 ml steril lösning.

Innehåll

Vatten, Hyascent-S, natriumklorid, dinatriumfosfat, kaliumklorid, kaliumfosfat.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas för frost).

Bruksanvisning

1. Var noga med hygien vid all sårbehandling och använd gärna handskar.
2. Rengör skadan noggrant innan du använder Aptus SentrX SPRAY
3. Skaka flaskan och spraya sedan Aptus SentrX SPRAY över såret. Var noga med att hela sårytan täcks.
4. Bandagera enligt gängse rutiner efter att SentrX har applicerats
5. Upprepa behandlingen dagligen (eller när du byter bandage) tills såret har läkt tillfredställande.
6. För små sår och revor kan det räcka med en behandling, vid mer omfattande skador kan behandlingen behöva upprepas tills såret sluter sig.
7. Vid upprepad behandling tvättas såret endast om det blivit förorenat/smutsigt.

